

Samlevejledning til badestol med ryg- og armlæn

varenummer 254300

1



Der medfølger 5 korte og 4 lange fingerskruer, samt O-ringe til dem alle.

De 4 lange skruer, bruges til at skrue krydsbenene på plads under sædet.


En af de korte skruer skal placeres i midten under sædet. Det er den, der holder de krydsede ben på plads.

2



De 4 resterende korte skruer skal bruges til samling af ryglænet.

3 + 4

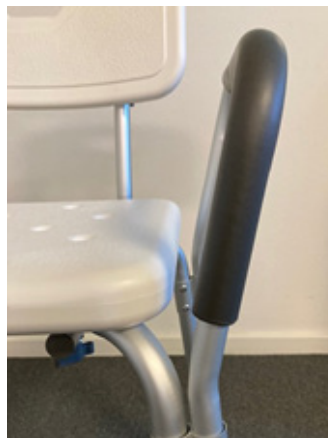

Underbenene klikkes alle sammen på de monterede "halve" ben på stolen.

Armlænene klikkes på - ned i ben-beslagene på siden af sædet, så de skræner ud af.